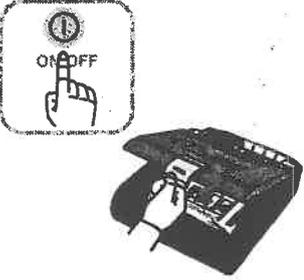
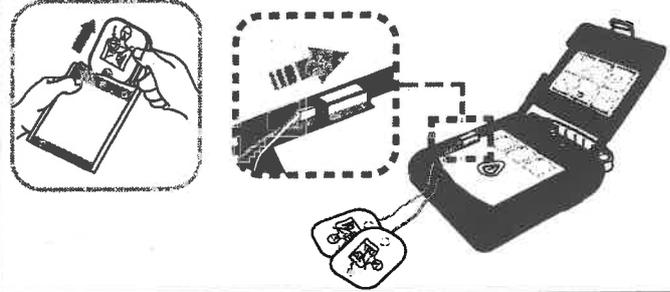
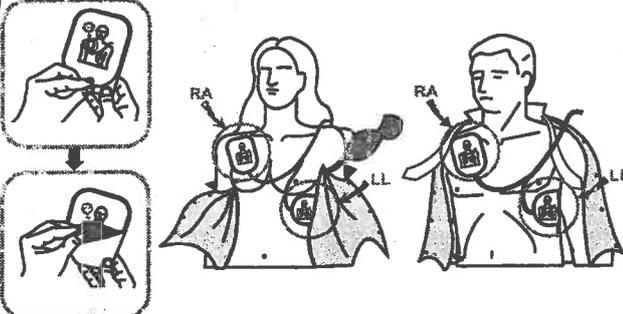
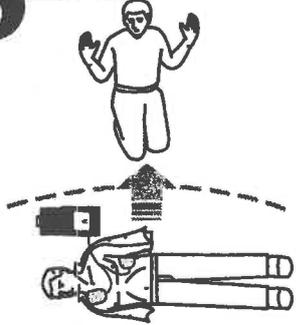


Étapes du sauvetage

1. Sortez les électrodes de leur sachet et connectez-les au dispositif i-PAD.
2. Écartez-vous et appuyez sur la touche CHOC si vous y êtes invité.
3. Administrez la RCR

<p>1</p>  <p>Allumez l'appareil et ouvrez le couvercle</p>	<p>2</p>  <p>Enlevez les vêtements du patient</p>	<p>3</p>  <p>Déballiez les électrodes et connectez les à l'appareil</p>
<p>4</p>  <p>Retirez les protections et positionnez les deux électrodes</p>	<p>5</p>  <p>"Analyse ECG en cours" Ecartez vous du patient</p>	<p>6</p>  <p>Si "choc conseillé", appuyez sur le bouton clignotant</p>